

# Victor Reader Stratus 12M

Pakrovimas. Grotuvo komplektacijoje rasite laidą, kurio vieną galą įjunkite į grotuvo lizdą, esantį grotuvo nugarėlėje (14). Kitą laido galą įjunkite į elektros lizdą. Prašome atminti, kad grotuvu galite naudotis ir krovimo metu.

**Įjungti/Išjungti (8)** mygtukas gali šviesti oranžine arba žalia šviesa. Oranžine spalva švies ir mirksės jeigu grotuvas yra išjungtas ir kraunasi iš elektros lizdo. Baterija bus pilnai įkrauta jeigu mygtukas nustos mirksėti. Norėdami įjungti grotuvą paspauskite ir palaikykite keletą sekundžių mygtuką **Įjungti/Išjungti (8)**. Atleidę mygtuką, palaukite apie 15 sekundžių, kol grotuvas pasikraus.

Grotuvo viršuje virš rankenos yra įmontuotas garsiakalbis. Garsiakalbio kairėje pusėje yra trys stulpeliai po du mygtukus, kuriais galima reguliuoti šiuos parametrus: **Tonas (1), Garsas (2), Greitis (3)**.

Šių mygtukų apačioje yra telefono stiliaus klaviatūra (4) su 12 mygtukų. Mygtukas 5 yra pažymėtas iškilioju tašku. Naudodamiesi šiais mygtukais galima įvesti reikiamą puslapio ar pastraipos numerį. Mygtukai su numeriais 2, 4, 6 arba 8 bus dažnai naudojami navigacijai: aukštyn, į kairę, į dešinę, žemyn. Ketvirtoje eilutėje pirmas mygtukas \* atlieka funkciją atšaukti, o paskutinis mygtukas # atlieka funkciją patvirtinti.


Grotuvo kairėje pusėje žemiau garsiakalbio yra išsidėstę trys mygtukai stulpeliu. Mygtuko viršuje **Eiti į (5)** pagalba nueisite į reikiamą poziciją - tam tikrą puslapį, failą ar knygos numerį. Mygtukas **Žyma (6)** atlieka žymeklio funkciją ir skirtas sukurti, pašalinti ar nueiti į sukurtų žymų sąrašą. Paskutinį mygtuką **Atšaukti (7)** spauskite tuomet, kai norite išimti kompaktinį diską grotuve.

Dvylikos mygtukų klaviatūros apačioje, centre yra **Miego režimo (12)** mygtukas, kuris leis nustatyti laikmatį, po kurio grotuvas išsijungs automatiškai. Paspaudus vieną kartą šį mygtuką išgirsite laiką ir datą. Paspauskite **Miego režimo (12)** mygtuką du kartus ir nustatysite 15 minučių miego laikmatį. Su kiekvienu papildomu **Miego režimo (12)** mygtuko paspaudimu prisidės po 15 minučių papildomo laiko. Maksimalus miego laikas yra 60 minučių.

Trys mygtukai apačioje turi šias reikšmes: **Atsukimas (9), Pradėti/Sustabdyti (10), Prasukimas (11)**.

Norėdami pradėti groti knygą, paspauskite mygtuką **Pradėti/Sustabdyti (10)**. Norėdami sustabdyti knygos grojimą, vėl paspauskite mygtuką **Pradėti/Sustabdyti (10)**.

Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Atsukimas (9)** arba **Prasukimas (11)** iki kol pasieksite norimą vietą. Kuo ilgiau laikysite paspaudę mygtuką, tuo greičiau pradės atsukti arba prasukti į priekį. Kas tris sekundes prasuksite 1 minutę, 2 minutes, 5 minutes, 10 minučių, 15 minučių ir t.t. Didžiausias galimas šuolis yra 5 minutės. Grotuvas informuos apie prasukamą laiko šuolį. Jeigu tiesiog trumpai paspausite mygtuką **Atsukimas (9)** arba **Prasukimas (11)**, vietoj paspaudimo ir palaikymo, įrašo atkūrimas prašoks atgal arba į priekį 5 sekundes.

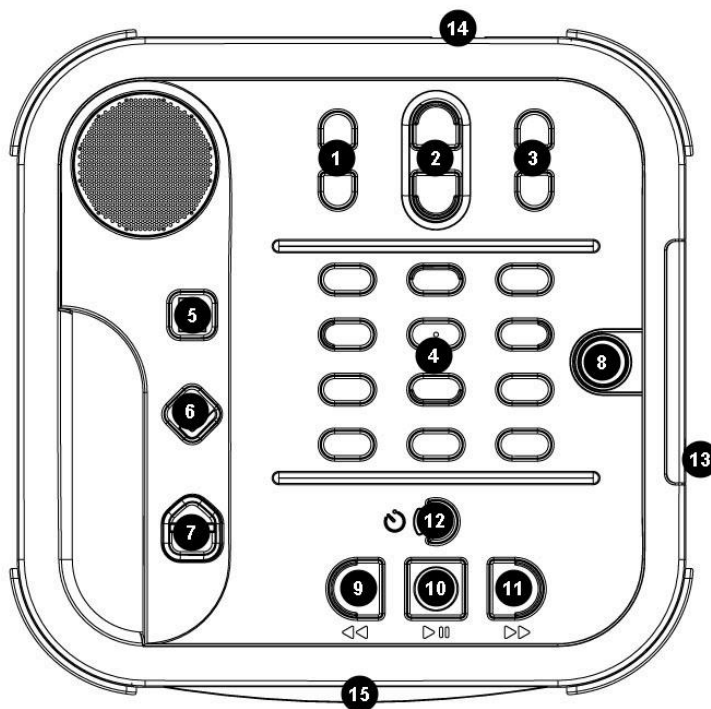

Grotuvo dešinėje nugarėlėje **(13)** rasite ausinių, USB atminties rakto ir SD atminties kortelės lizdus. Grotuvo nugarėlėje nukreiptoje į jus rasite plokščią angą **(15)** kompaktiniam diskui įdėti.

### **Kaip pradėti skaityti knygą, įrašytą kompaktiniame diske?**

Visų pirma įjunkite grotuvą. Įspauskite ir palaikykite 3 sekundes **Ijungti/Išjungti (8)** mygtuką, išgirdę signalą atleiskite mygtuką ir palaukite apie 15 sekundžių, kol išgirsite sveikinimą prisijungus prie grotuvo. Įdėkite kompaktinį diską į angą **(15)**, esančią grotuvo priekyje.

Spauskite **Pradėti/Sustabdyti (10)** mygtuką, norint pradėti įrašų grojimą. Norėdami sustabdyti ar įjungti pauzę įrašo grojime dar kartą paspauskite tą patį mygtuką.

Spauskite mygtukus **Atsukimas (9)** arba **Prasukimas (11)**, norėdami prasukti atgal arba į priekį grojamą įrašą 1 minutę, 2 minutes, 5 minutes, 10 minučių, 15 minučių ir daugiau.

Norėdami baigti skaityti, paspauskite ir palaikykite (kol išgirsite signalą) **Ijungti/Išjungti (8)** mygtuką.

Dėmesio: jeigu kompaktinį diską įdėsite neteisinga puse, po 15 sekundžių grotuvas automatiškai gražins atgal.

Dėmesio: jeigu grotuvas nebus įjungtas krovimuisi į elektros lizdą ir bus paspausta pauzė, grotuvas automatiškai išsijungs po 30 minučių.

Norint ištraukti kompaktinį diską iš grotuvo, paspauskite mygtuką **(7)**.

### **Mygtukų apibūdinimai**

Klaviatūroje paspaudus skaičių 0 galite įjungti mygtukų apibūdinimą, kuris padės jums geriau susipažinti su grotuvu ir kiekviena mygtuko funkcija. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 0 kol išgirsite „mygtukų apibūdinimas“. Tuomet paspaudus bet kurį mygtuką, grotuvas įgarsins jo pavadinimą. Norint išjungti šią funkciją, spauskite mygtuką 0 kol išgirsite „mygtuko apibūdinimas išjungtas“.

## **GARANTIJA**

Šiam gaminiui taikome:

- 36 mėnesių garantija grotuvui. Garantija taikoma tik gedimui atsiradusiam dėl gamintojo kaltės;
- 12 mėnesių garantija baterijai.

Garantija suteikiama tik tuo atveju, jeigu gaminys buvo naudojamas laikantis naudotojo instrukcijų; remontui naudojamos originalios atsarginės dalys, reguliariai atliekami priežiūros darbai.

Garantija neapima paviršiaus pažeidimų, natūralaus nusidėvėjimo, gedimų atsiradusių dėl vartotojų kaltės. Garantija taip pat neapima gaminiui padarytos žalos dėl neatsakingo gaminio naudojimo, kai nesilaikoma gaminio naudojimo instrukcijoje nurodytų priežiūros reikalavimų.

Pastebėjus gaminio gedimą, nedelsdami kreipkitės į įgaliotą atstovą Lietuvoje.

### **BIOMEDIKOS CENTRAS, UAB**

**Antakalnio g. 36, Vilnius**

**LT-10305, Lietuva**

**Tel. +370 700 55440**

### **GARANTINIS TALONAS**

Modelio pavadinimas:

Pristatymo data:

Įgalioto atstovo antspaudas: